

PRECISION MR é um dispositivo inovador, indicado para reparo de menisco na técnica All-inside, projetado para reparos mais seguros e precisos. Utiliza-se 2 pequenas âncoras em PEEK, com nó pré-atado e sutura 2-0, não absorvível, de alta resistência, Force Fiber®.


REPARO MAIS SEGURO E PRECISO!



Escaneie este QR Code e assista a aplicação em vídeo 3D.


*AGULHA CURVA

Maior segurança na inserção

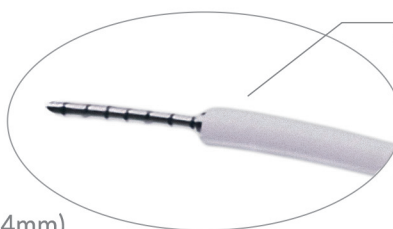

AGULHA DE BAIXO CALIBRE (1,4mm)

Mínima agressão ao menisco

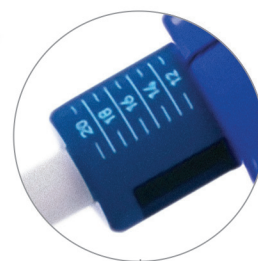

AJUSTE FINO DE PROFUNDIDADE

Possibilita o acesso seguro às lesões posteriores e do terço médio do menisco

FIO FORCE FIBER®

Segurança no encurtamento do nó

GATILHO PRECISO

Estabilidade e segurança no disparo do implante (2 disparos)


CABO ERGONÔMICO

Estabilidade e precisão nos movimentos

Disponível em agulhas reta, *curva e reversa

- Pequenos implantes em PEEK (2 disparos)
- Fio de sutura em polietileno de ultra alto peso molecular FORCE FIBER®

Veja o passo-a-passo para sua utilização

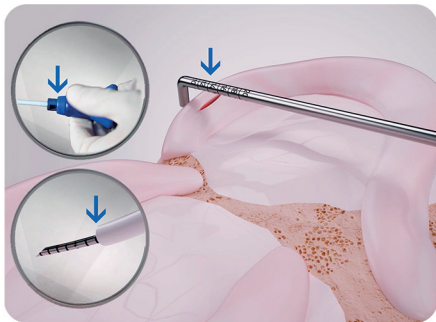


Ajustar o limitador de inserção da agulha conforme marcação indicativa, no PROBE ARTROSCÓPICO GRADUADO SÍNTEGRA.




Inserir a agulha do dispositivo na articulação, utilizando a CÂNULA ARTROSCÓPICA PRECISION MR.



Inserir a agulha no local pretendido até o limitador de profundidade.

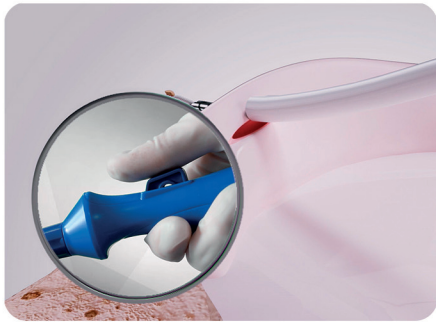

Pressionar o gatilho até o final para colocação do primeiro implante (deve haver o estalido). Liberar o gatilho para preparação e colocação do segundo implante.

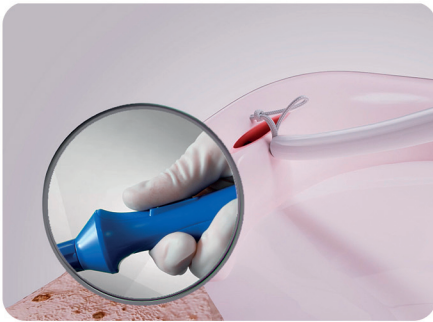

Reinserir a agulha na segunda posição pretendida e pressionar novamente o gatilho até o final para colocação do segundo implante. Retirar o dispositivo.



Puxar com cautela a extremidade solta da sutura para ajustar o nó e fechar a lesão. Finalizar o aperto do nó e cortar a sutura remanescente utilizando o EMPURRADOR E CORTADOR DE NÓ PRECISION MR.

Modelos do PRECISION MR

REGISTRO ANVISA	MODELOS COMERCIAIS	RG
80739420018	PRECISION MR SUTURA MENISCO ALL-IN RETO	1265050
	PRECISION MR SUTURA MENISCO ALL-IN CURVO	1268237
	PRECISION MR SUTURA MENISCO ALL-IN REVER	1268238

Instrumentais para utilização do PRECISION MR

MODELOS COMERCIAIS	RG
PROBE ARTROSCÓPICO GRADUADO SÍNTEGRA	1273758
CÂNULA ARTROSCÓPICA PRECISION MR	1268904
EMPURRADOR CORTADOR DE NÓ SLIM PRECISION MR	1275767

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A INSTRUÇÃO DE USO ACESSANDO NOSSO PORTAL:

www.sintegrasurgical.com.br

SINTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1750
Pirajá
CEP 17.580-000
Pompeia/SP

Serviço de apoio ao distribuidor:
(14) 3405-2373
sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br

Precision MR