


Aplicação dos sensores FreeStyle Libre

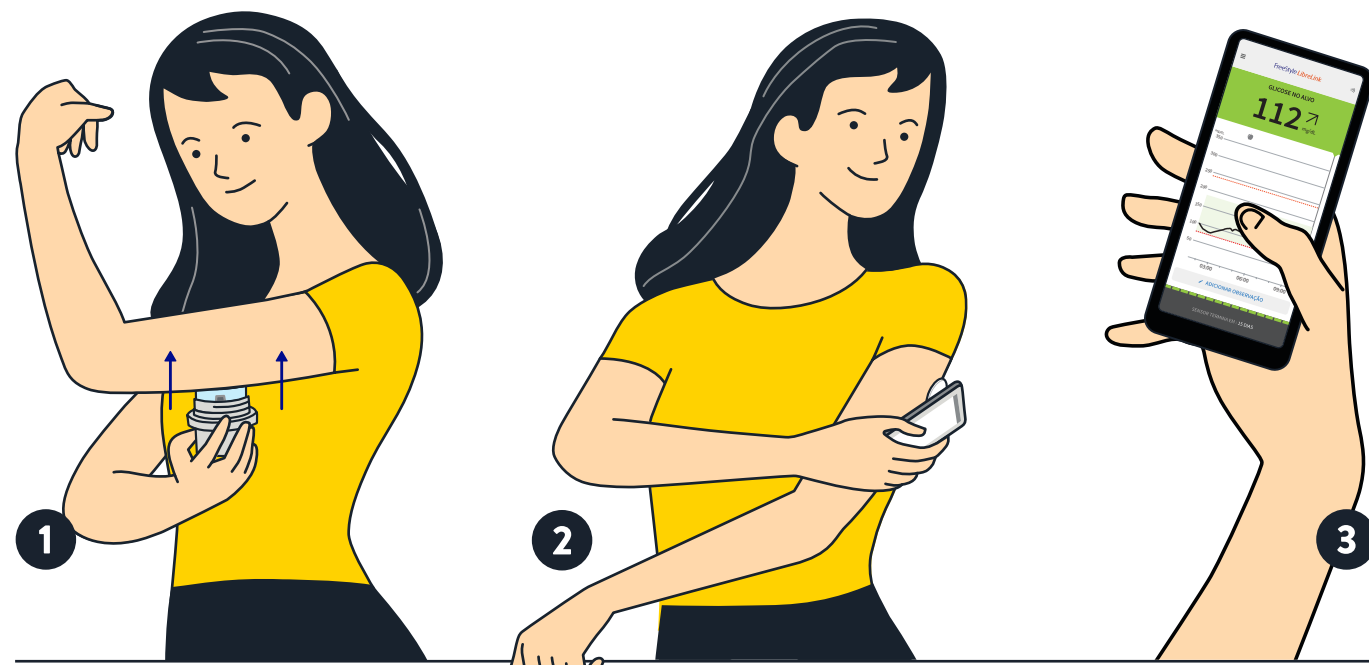

Aplique

o sensor na parte posterior do braço.

Escaneie

para ver instantaneamente os resultados de glicose, mesmo sobre a roupa.

Obtenha a leitura

o valor da glicose atual, o histórico das últimas 8 horas e a seta de tendência mostrando se está subindo, descendo ou mudando lentamente.

Estimule o automonitoramento que pode levar a melhores resultados¹⁻³ com os sistemas FreeStyle Libre.

Isso é evoluir.



Saiba Mais:
Veja como usar
FreeStyle Libre

Saiba mais em: [FreeStyleLibre.com.br](https://www.FreeStyleLibre.com.br)




 **FreeStyle
Libre**


Abbott

ADC-108875 v1.0. Imagens meramente ilustrativas. Os dados apresentados são meramente ilustrativos e não constituem dados de um paciente real. Exclusivo para profissionais de saúde. 1. Fokkert, M. BMJ Open Diabetes Research & Care (2019). <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2019-000809>. 2. Haak, T. Diabetes Therapy (2017). <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. 3. Campbell, F. M. Pediatric Diabetes. (2018). <https://doi.org/10.1111/pedi.12735>. FreeStyle Libre: Sensor – Registro ANVISA: 80146502021. FreeStyle Libre Leitor – Registro ANVISA: 80146501903. ANATEL – 04072-14-09992. FreeStyle LibreLink – Registro ANVISA: 80146502168. LibreView e LibreLink Up – Notificação ANVISA: 80146502374. FreeStyle Libre 2 Plus Sensor – Registro ANVISA: 80146502386. ANATEL 16869-23-09992. FreeStyle Libre 2 Leitor – Registro ANVISA: 80146502385. ANATEL 16884-23-09992. O sistema FreeStyle Libre 2 inclui o sensor FreeStyle Libre 2 Plus, o leitor FreeStyle Libre 2, os aplicativos FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp e o sistema LibreView. A estrutura do sensor, FreeStyle Libre e marcas relacionadas são marcas da Abbott. Abbott FreeStyle: 0800 703 0128.

 **FreeStyle
Libre**

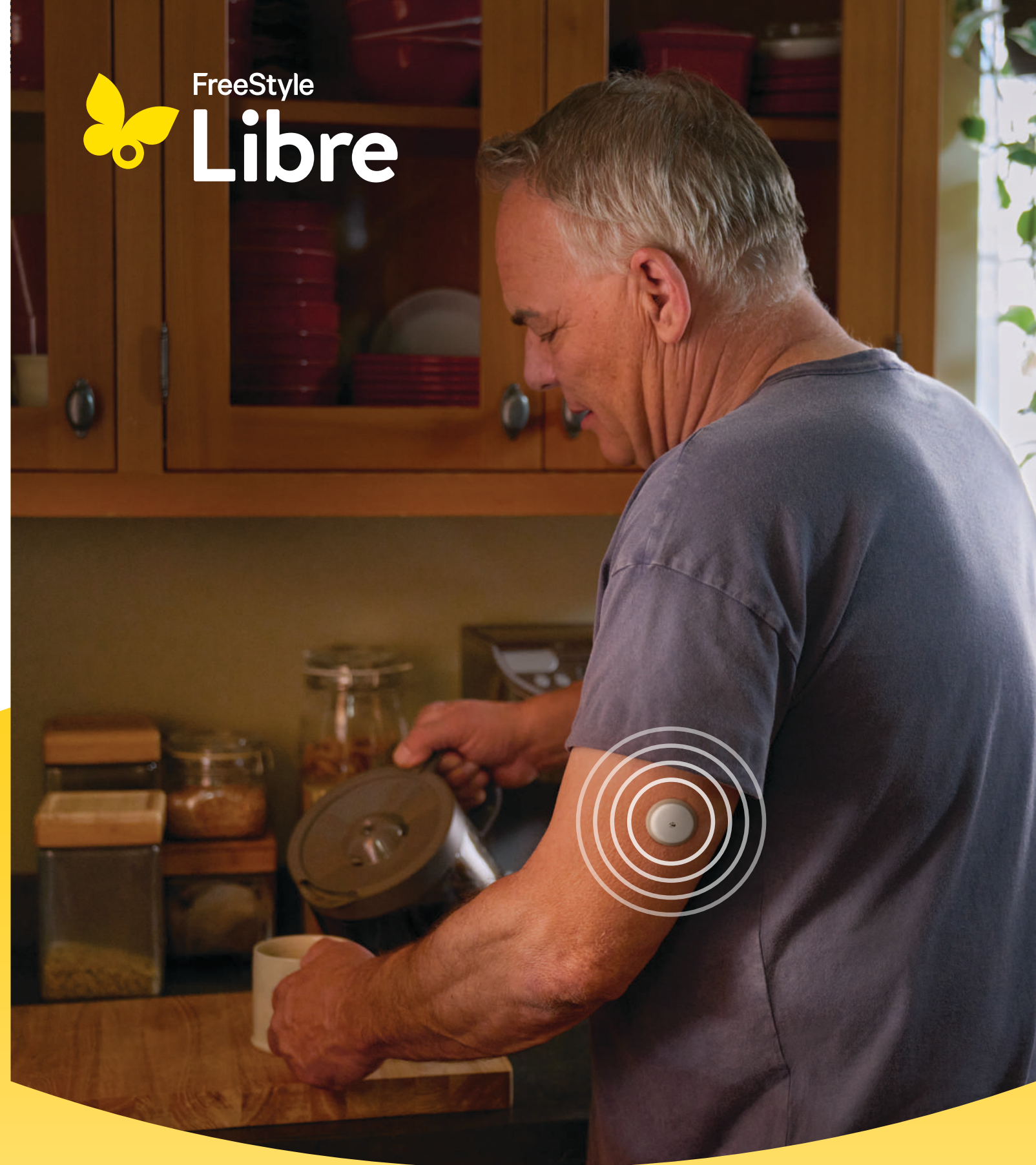

**Sistemas
FreeStyle Libre**


Abbott

Os anos passaram, e as tecnologias de monitoramento de glicose evoluíram



1 Tiras para glicosúria



2 Tiras para glicemia capilar




3 Monitoramento contínuo de glicose

Agora é a hora de dar mais um passo à frente

Ecosistema FreeStyle Libre

Sensor FreeStyle Libre 2 Plus

- Fácil de aplicar e confortável de usar por até 15 dias¹
- Pequeno e discreto (semelhante a uma moeda de 1 real)¹
- Mede a glicose de forma contínua,² durante o dia e a noite
- Resistente a água,³ natação, banhos e exercícios físicos

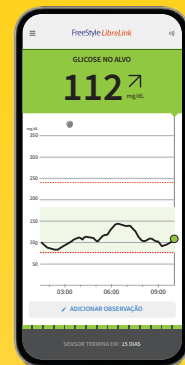

Aplicativo FreeStyle LibreLink

- Os pacientes podem verificar facilmente sua glicose utilizando o smartphone⁴ com o app FreeStyle LibreLink⁵
- A glicose pode ser verificada através do leitor, FreeStyle LibreLink ou ambos⁶
- Os dados de glicose são automaticamente carregados⁴ para o LibreView,⁷ não havendo necessidade de fazer o download dos dados
- Alarmes opcionais de glicose baixa e alta e alarme de perda de sinal^{8,9}



Aplicativo LibreLinkUp

- LibreLinkUp permite o monitoramento da glicose de seus pacientes a qualquer hora¹⁰ ou lugar, mesmo a distância¹¹
- O LibreLinkUp é um app que permite o compartilhamento das leituras de glicose em tempo real¹² com cuidadores e familiares
- O monitoramento pode ser compartilhado com até 20 pessoas




Leitor FreeStyle Libre 2

- Escaneia através da roupa¹³
- Fornece até 8 horas de histórico da glicose, uma seta de tendência, gráficos de fácil entendimento para o paciente e armazena 90 dias de dados de glicose


Glicemia capilar x glicose intersticial

O sistema FreeStyle Libre mede a glicose intersticial (ISF). Isso é diferente do monitoramento de glicose tradicional, que precisa de sangue e tiras teste para aferir os níveis de glicemia.

Monitoramento tradicional de glicose no sangue

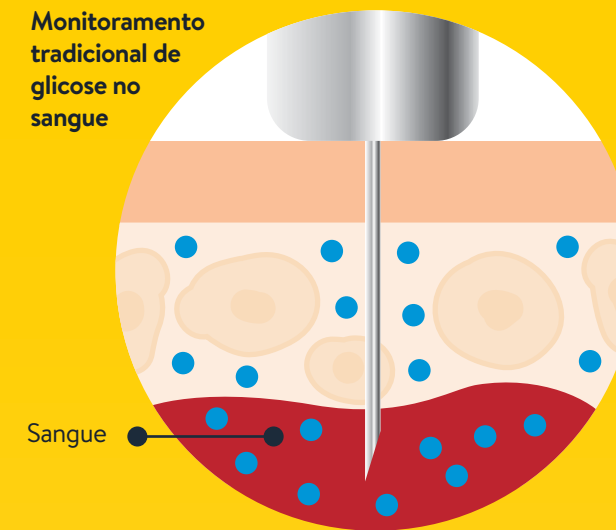

Sistema flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre

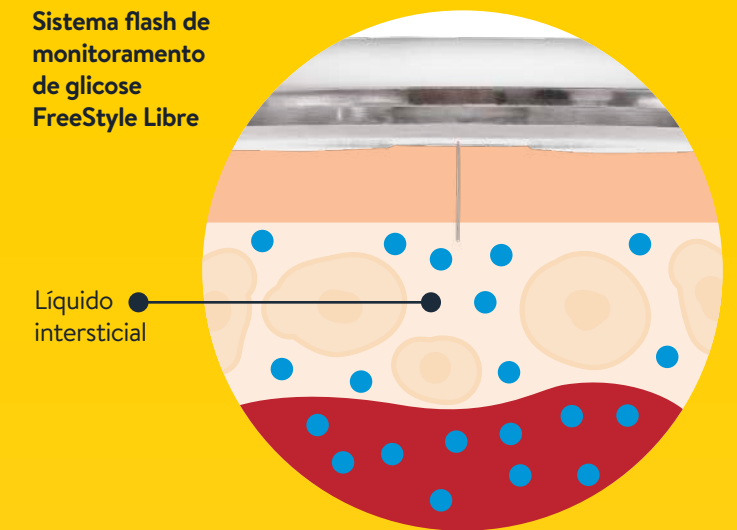

Líquido intersticial

Sangue

O que isso significa?

Pode haver um atraso de 5 a 10 minutos entre os níveis de glicose no líquido intersticial e no sangue.

Se a glicose no sangue subir ou descer rapidamente, como por exemplo depois da refeição, após a aplicação de insulina ou de exercício físico, a leitura do sensor FreeStyle Libre poderá ser diferente da leitura do monitor com tiras.



Saiba mais:
Como é a glicose do líquido intersticial?

Monitoramento completo da glicose

Presente
(Número)


Leitura de glicose atual

Futuro
(Seta de tendência)

Uma seta de tendência indica para onde a glicose está apontando

Passado
(Gráfico)

Até 8 horas de histórico de leituras

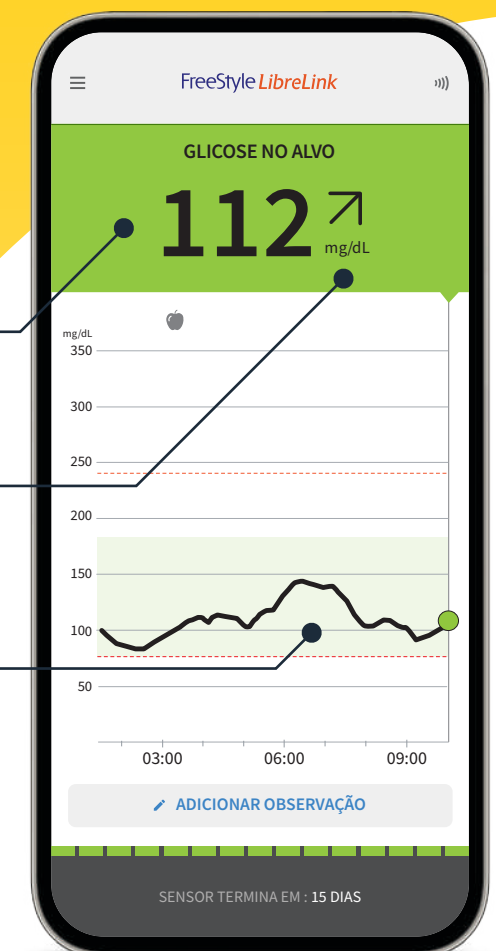

Imagens meramente ilustrativas. Alarme de glicose baixa pode ser definido no intervalo de 60-100 mg/dL. Alarme de glicose alta pode ser definido no intervalo de 120-400 mg/dL. Alarme de perda de sinal ocorre após 20 minutos sem conexão com app LibreLink. Todos os alarmes vêm por padrão desligados. 1. Haak, T. Diabetes Therapy (2017): <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. 2. Para um panorama glicêmico completo o sensor deve ser escaneado a cada 8 horas. 3. O sensor é resistente a água em até 1 metro de profundidade. Não mergulhe por mais de 30 minutos. 4. O aplicativo FreeStyle LibreLink só é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operacionais. Verifique o Guia de Compatibilidade para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar o aplicativo. O uso do FreeStyle LibreLink pode exigir o registro no LibreView. 5. FreeStyle LibreLink e o leitor de FreeStyle Libre possuem recursos parecidos, mas não idênticos. 6. Para usar o leitor FreeStyle Libre e o aplicativo FreeStyle LibreLink com o mesmo sensor, inicie o sensor com o leitor primeiro e em seguida escaneie com o aplicativo. Os dados não são sincronizados entre os dispositivos, assim, para garantir que seus relatórios incluam todos os dados disponíveis, escolha um dispositivo que você usará para escanear seu sensor pelo menos uma vez a cada 8 horas. Para comunicar tanto o leitor quanto o FreeStyle LibreLink com o sensor, é preciso ativar o sensor com o leitor e em seguida pará-lo com o FreeStyle LibreLink. 7. O site LibreView só é compatível com determinados sistemas operacionais e navegadores. Consulte www.libreview.com para obter informações adicionais. 8. As leituras de glicose são exibidas automaticamente no aplicativo apenas quando o smartphone e o sensor estão conectados e dentro do alcance de até 6 metros. 9. As notificações serão recebidas apenas quando os alarmes estiverem ligados e o sensor estiver a menos de 6 metros do dispositivo de leitura. Você deve sobrepor as configurações de "Não Perturbe" para receber alarmes e alertas no seu smartphone. 10. O LibreView (incluindo o aplicativo para celular LibreLinkUp) não se destina a ser o monitor de glicose primário: os usuários devem consultar seu(s) dispositivo(s) primário(s) e consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer interpretação médica e ajustes terapêuticos a partir das informações do software. Profissionais de saúde devem usar informações do software em conjunto com outras informações disponíveis. 11. A leitura de glicose será transmitida para o LibreLinkUp após o escaneamento no FreeStyle LibreLink. 12. A transferência das leituras de glicose entre FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp depende de conexão com a internet. 13. O leitor pode escanear dados do sensor dentro de uma distância de 1 cm a 4 cm.

Imagens meramente ilustrativas. Os dados apresentados são meramente ilustrativos e não constituem um paciente real.